

# IDEXX ベットラボステーション

## クイックガイド

IDEXX ベットラボステーション (IDEXX VetLab\* Station) の使用に関する詳細情報 (検査の追加、結果の再割り当て、SNAP\* 検査結果の入力など) については、[idexx.com/product-info](https://idexx.com/product-info) または [learn.idexx.com](https://learn.idexx.com) をご覧ください。




### 初期画面の操作

#### 検査器のステータスアイコン

色分けされたアイコンで、測定中の検査器や使用可能な検査器を確認できます。

- ・ 緑 (準備完了) – 接続中および通信中
- ・ 黄色 (使用中/スタンバイ) – 使用中またはスタンバイモード中
- ・ 灰色 (オフライン) – 接続が切断されています
- ・ 赤 (お知らせ) – 問題が発生しました – アイコンをタップして詳細を確認してください

検査待ちリスト、または受付済み患者のリスト  
顧客情報管理システム (PIMS) を使用している場合は、初期画面の設定を変更して、検査待ちリストや受付済み患者のリストを含めることができます。有効にしたら、ドロップダウン矢印を使用して、表示する次のリストを選択します。

- ・ 検査待ちリスト – 連携済みPIMSで未処理の要求がある患者のリストを確認し、患者名をタップして検査を開始します。削除アイコン  を使用して、選択した患者を検査待ちリストから削除することもできます。
- ・ 検査待ちリスト – 連携済みPIMSを通じて院内にチェックインした患者のリストを表示し、患者名をタップして検査を開始します。

#### 検索ボタン

タップして、検査待ちリストまたは受付済み患者のリスト (表示されている方) で特定の患者を検索し、検査を開始します。


#### 「追加/検査」ボタン

タップして患者情報を手動で入力し、検査を開始します。

#### 検査中リスト

現在測定中の検査、測定待機中の検査、またはアクションが必要な検査を確認します。

#### メッセージセンター

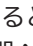
IDEXX からの通知を表示するには、 をタップします。


#### IDEXX SmartService インジケーター

ドットの色は、IDEXX スマートサービスソリューション (IDEXX SmartService\* Solutions) の接続状態を示します:

- ・ 緑 – 接続中
- ・ 黄色 – 接続処理中
- ・ 灰色 – 無効
- ・ 赤 – オフライン

#### 歯車アイコン

 をタップするとメニューが開き、各検査器へのアクセス、設定のカスタマイズ、ヘルプの参照、メッセージの表示やシステムの電源を切ることができます。

「すべての結果を表示」アイコン  をタップすると、患者別の過去の院内検査結果がすべて表示されます。


「結果の検索」ボタン  
特定の患者結果を検索します。

#### 結果リスト



過去7日以内の院内患者結果のリストを確認します。タップして患者を選択し、結果を表示または印刷します。



## 連携済みPIMSによる検査の開始

1. 初期画面の検査待ちリストまたは受付済み患者のリストから目的の患者をタップするか、をタップして、検査待ちリストまたは受付済み患者のリストから患者を検索します。
2. 目的の検査器を選択し、「測定」をタップします。

## IDEXXベットラボステーションから直接検査を開始

1. 初期画面で  または  をタップします。
2. 患者情報を選択/入力します。
  - + 新規患者の場合-「患者登録」をタップして、患者/オーナーの情報を入力し、「次へ」をタップします。次に、患者/病院情報を確認/指定し、目的の検査器を選択して「測定」をタップします。
  - + 既存患者の場合-患者、名字、またはオーナーIDのいずれかのボックスをタップし、該当する情報を入力します。タップしてリストから目的の患者を選択し、「次へ」をタップします。次に、患者/病院情報を確認/指定し、目的の検査器を選択して「測定」をタップします。
  - + 救急患者の場合-「簡易入力」をタップします。動物種とライフステージを選択します。システムは患者を識別するための固有のタイムスタンプを自動的に入力します (後で検査結果を再割り当てする際に使用できます)。「次へ」をタップします。
3. 目的の検査器を選択し、「測定」をタップします。

## 手動 SNAP 検査結果の入力/編集

### 手動で SNAP 検査結果を入力する場合:

1. 検査中リストの「スナップ」アイコンをタップするか、スナップタイマー終了ダイアログボックスの「結果の追加」をタップします。
2. スナップ検査結果ウィンドウに一致する画像をタップします。
3. (オプション)「コメント」タブをタップし、ユーザ ID と検査結果に対するコメントを入力します。
4. 「保存」をタップします。

### SNAP 検査結果を編集する場合:

1. 結果画面から、「検査結果の管理」をタップします。
2. 「手動による検査結果の編集」をタップし、編集するスナップ検査結果を選択します。
3. 変更後、「保存」をタップします。

## 尿の物理的および化学的性状の手動入力


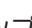

### 測定中に化学的および物理的性状を追加する場合:

1. 尿検査を開始します。
2. 希望する検査器のアイコンを選択するプロンプトが表示されたら、「手動UA」アイコンをタップし、検体の採取方法、色、透明度を選択します。
3. 検体の比重を入力します。
4. 検体のpHに合った色をタップします。
5. すべての化学分析結果が正常な場合は、「すべての項目を陰性/正常に設定」をタップし、そうでない場合は適切な結果を指定します。(一部の結果のみを変更する場合は、変更した時点で「次へ」をタップします)。
6. コメントを入力し、「完了」をタップします。

### 手動で UA プロパティを編集する場合:


1. 結果画面から、「検査結果の管理」をタップします。
2. 「手動による検査結果の編集」をタップし、編集する手動UA結果を選択します。
3. 変更後、「保存」をタップします。

## 結果の表示および印刷

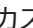
1. 次のいずれかの操作を行います。
  - + 検査が完了した直後に結果を表示するには、「新規測定」の通知メッセージをタップします。
  - + 過去7日間に取得された結果を表示するには、初期画面の検査結果リストで患者名をタップします。
  - + 過去の結果を表示するには:
    - 初期画面の検査結果で検査結果の検索をタップするか、をタップして、検索して希望の患者を選択し、表示をタップします。
    - 初期画面以外の画面で、をタップし、希望の患者を検索して選択し、表示をタップします。
2. 目的の結果が含まれているタブをタップします。
3.  をタップすると、選択したタブのすべての検査結果の総合レポートが印刷されます。

## 毎週のメンテナンス

IDEXX では、毎週システムを再起動することを推奨しています。

1.  をタップし、次に「電源を切る」をタップします。
2. 「電源を切る」または「再起動」のいずれかをタップします。

## 設定をカスタマイズする

IDEXXベットラボステーションは、貴院のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 をタップしてから、「設定」をタップします。