

IDEXX ベットラボ ステーション

クイックガイド

IDEXX ベットラボステーション (IDEXX VetLab* Station) の使用に関する詳細情報 (検査の追加、結果の再割り当て、SNAP* 検査結果の入力など) については、idexx.com/product-info または learn.idexx.com をご覧ください。



ホーム画面の操作

検査器のステータスアイコン

色分けされたアイコンで、測定中の検査器や使用可能な検査器を確認できます。

- ・ **緑 (準備完了)**—接続中および通信中
- ・ **黄色 (ビジー/スタンバイ)**—使用中またはスタンバイモード中
- ・ **灰色 (オフライン)**—接続が切断されています
- ・ **赤 (お知らせ)**—問題が発生しました—アイコンをタップして詳細を確認してください

メッセージセンター
IDEXX からの通知を表示するには、 をタップします。

IDEXX SmartService インジケータードットの色は、IDEXX スマートサービスソリューション (IDEXX SmartService* Solutions) の接続状態を示します:

- ・ **緑**—接続中
- ・ **黄色**—接続処理中
- ・ **灰色**—無効
- ・ **赤**—オフライン

歯車アイコン

をタップするとメニューが開き、各検査器へのアクセス、設定のカスタマイズ、ヘルプの参照、メッセージの表示やシステムの電源を切ることができます。

省略記号 (...)

"..." をクリックすると受付済み患者のリストを表示したり、検査待ちリストからリクエストを削除したりするオプションが表示されます。

検査待ちリスト

顧客情報管理システム (PIMS) で、どの患者が検査待ち状態かを確認します。



結果の検索

患者の検査結果を検索します。

結果

過去 7 日以内の院内患者結果のリストを確認します。タップして患者を選択し、結果を表示または印刷します。


検索と追加ボタン

「検索」をタップして、検査待ちリストから患者を検索します。「追加」をタップして、患者情報を手動で入力します。


検査中表示エリア

現在測定中の検査、測定待機中の検査、またはアクションが必要な検査を確認します。

PIMSによる検査の開始

1. 初期画面の検査待ちリストまたは受付済み患者のリストから目的の患者をタップするか、 をタップして、検査待ちリストから患者を検索します。
2. 目的の検査器を選択し、「測定」をタップします。

IDEXXベットラボステーションから直接検査を開始

初期画面で  をタップし、次を行います：

新規患者の場合：

1. 患者登録をタップし、患者/オーナー情報を入力し、「次へ」をタップします。
2. 患者/病院情報を確認/指定し、目的の検査器を選択し、「測定」をタップします。

既存の患者の場合：

1. 患者、姓、オーナー IDのいずれかのボックスをタップし、該当する情報を入力します。タップしてリストから目的の患者を選択し、「次へ」をタップします。
2. 患者/病院情報を確認/指定し、目的の検査器を選択し、「測定」をタップします。

救急患者の場合：

1. 「簡易入力」をタップします。
2. 動物種とライフステージを選択します。システムは患者を識別するための固有のタイムスタンプを自動的に入力します（後で検査結果を再割り当てする際に使用できます）。
3. 「次へ」をタップします。
4. 目的の検査器を選択し、「測定」をタップします。

手動 SNAP 検査結果の入力/編集

手動で SNAP 検査結果を入力する場合：

1. 検査中表示エリアの「スナップ (SNAP)」アイコンをタップするか、スナップタイマー終了ダイアログボックスの「結果を追加」をタップします。
2. スナップ検査結果ウィンドウに一致する画像をタップします。
3. (オプション)「コメント」タブをタップし、ユーザ ID と検査結果に対するコメントを入力します。
4. 「保存」をタップします。

SNAP 検査結果を編集する場合：

1. 結果画面から、「検査結果の管理」をタップします。
2. 「手動結果の編集」をタップし、編集するスナップ検査結果を選択します。
3. 変更後、「保存」をタップします。

尿の物理的および化学的性状の手動入力



測定中に化学的および物理的性状を追加する場合：

1. 尿検査を開始します。
2. 希望する検査器のアイコンを選択するプロンプトが表示されたら、「手動UA」アイコンをタップし、検体の採取方法、色、透明度を選択します。
3. サンプルの比重を入力します。
4. サンプルのpHに合った色をタップします。
5. すべての化学分析結果が正常な場合は、「すべての項目を陰性/正常に設定」をタップし、そうでない場合は適切な結果を指定します。(一部の結果のみを変更する場合は、変更した時点で「次へ」をタップします)。
6. コメントを入力し、「完了」をタップします。

手動で UA プロパティを編集する場合：


1. 結果画面から、「検査結果の管理」をタップします。
2. 「手動結果の編集」をタップし、編集する手動 UA 結果を選択します。
3. 変更後、「保存」をタップします。

結果の表示および印刷


1. 次のいずれかの動作を実行します：
 - + 初期画面の結果リストで患者をタップします。
 - + 検査結果の通知メッセージをタップします。
 - + 初期画面の結果で、 結果の検索 をタップし、希望の患者を検索して選択し、「表示」をタップします。
2. 目的の結果が含まれているタブをタップします。
3.  をタップすると、選択したタブのすべての検査結果の総合レポートが印刷されます。

毎週のメンテナンス

IDEXX では、毎週システムを再起動することを推奨しています。

1.  をタップし、次に「電源を切る」をタップします。
2. 「電源を切る」または「再起動」のいずれかをタップします。

設定をカスタマイズする

IDEXXベットラボステーションは、貴院のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 をタップし、次に「設定」をタップします。